

>>> Mascarilla moldeada ONE-Fit® Healthcare N95 Molded Cup (HC-NB095)

Cómo colocarse y comprobar el ajuste de su mascarilla filtrante Sperian®

Descripción

La mascarilla quirúrgica de partículas ONE-Fit HC-NB095 es una mascarilla desechable clase N95 diseñada para ofrecer una eficiencia en su filtrado de al menos 95 % o mayor contra aerosoles o partículas libres de aceite. La mascarilla ofrece una Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE, por sus siglas en inglés) superior al 99% contra microorganismos generados por el portador de la mascarilla, y cumple las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto al control de la exposición a la bacteria M. Tuberculosis.

NOTA: La Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) se ha comprobado de acuerdo con el método descrito en MIL M36954C, ASTM F2101. La resistencia cumple la norma ASTM F1862, 160 mmHg.

Usos previstos

La mascarilla ONE-Fit HC-NB095 está prevista para ser utilizada por personal de asistencia médica para proteger al portador de la mascarilla y al paciente, al reducir la transferencia de microorganismos y de otras partículas de transmisión aérea. La máscara resistente a los fluidos protege asimismo contra salpicaduras de sangre y de otros materiales infecciosos.

Cómo colocarse la mascarilla

Siga estas instrucciones siempre que vaya a utilizar mascarilla.



PASO 1

Sostenga el respirador en una mano, de modo que las cintas para sujetarla a la cabeza cuelguen libremente.



PASOS 2 y 3

Coloque el mentón en la parte inferior de la mascarilla, con la parte superior de la mascarilla apuntando hacia afuera.

Pase la cinta inferior por detrás del cuello de forma que quede por debajo de las orejas.



PASO 4

Sin dejar de sostener con una mano la mascarilla contra su rostro, pase la cinta superior por encima de la cabeza hasta la coronilla, de forma que quede por encima de las orejas.



PASO 5



PASO 6

Coloque las manos a ambos lados de la mascarilla y muévela ligeramente hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, a fin de ajustar la posición de la mascarilla y conseguir que se adapte de forma óptima a su rostro.

Antes de utilizar el respirador, realice una comprobación del ajuste.

Instrucciones para comprobar el ajuste

- Coloque ambas manos sobre la mascarilla; tenga cuidado de **NO** mover de lugar la mascarilla.
- Exhale con fuerza (deberá sentir una presión positiva en el interior de la mascarilla).
- Si detecta fugas de aire, vuelva a ajustarse las cintas de sujeción de la mascarilla o la posición de la mascarilla.

ADVERTENCIA: Si no consigue que la máscara se ajuste a su rostro de forma satisfactoria, **NO** ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.

Instrucciones de uso

1. El incumplimiento de alguna de las instrucciones y restricciones relativas al uso de la mascarilla, o no utilizar la mascarilla durante todo el tiempo que dure la exposición a los contaminantes puede afectar drásticamente las características de la mascarilla y ocasionar enfermedades, lesiones o muerte.
2. Antes de utilizar la mascarilla, el empleador debe proporcionarle capacitación acerca del uso correcto de la mascarilla conforme a las normas de sanidad y seguridad pertinentes.
3. La normativa de la OSHA, incluyendo las normas 29CFR1910.134(e)(5) y (f), y la norma Z94.4-93 de la CSA, exigen que se realicen pruebas de ajuste a la persona que deba llevar la mascarilla.
4. Si siente dificultad para respirar o la mascarilla sufre algún daño, salga del área contaminada.
5. En las siguientes circunstancias, deseche la mascarilla y cámbiela por una nueva:
 - la mascarilla se obstruye excesivamente y siente dificultad para respirar.
 - la mascarilla sufre algún daño.
 - la mascarilla se contamina con sangre o fluidos corporales.
6. Cuando utilice la mascarilla en procedimientos quirúrgicos, deséchela después de cada uso.
7. **NO** utilice la mascarilla si tiene barba o vello facial que impida el contacto directo entre el rostro y el borde de la mascarilla, ni bajo ninguna otra circunstancia que pueda impedir la creación de un buen sello entre la mascarilla y el rostro.
8. Esta mascarilla **NO** debe utilizarse en niños.

Advertencia

Esta mascarilla ayuda a protegerse contra determinados agentes contaminantes. Sin embargo, es posible que no elimine el riesgo de contraer una enfermedad o infección. El uso incorrecto de una mascarilla puede causar enfermedades o la muerte.

Las cintas de sujeción de la mascarilla están hechas de caucho sin látex. Sin embargo, las personas que sean muy sensibles al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.

Para obtener más información o asistencia en relación con los productos Sperian de protección para la respiración, contacte a su distribuidor local de Sperian directamente a Sperian Respiratory Protection | www.sperianprotection.com