

## >>> Mascarilla plegable ONE-Fit® Healthcare N95 Flat Fold (HC-NB295F)

### Cómo colocarse y comprobar el ajuste de su mascarilla filtrante Sperian®

#### Descripción

La mascarilla quirúrgica de partículas ONE-Fit HC-NB295F es una mascarilla desechable clase N95 diseñada para ofrecer una eficiencia en su filtrado de al menos 95 % o mayor contra aerosoles o partículas libres de aceite. La mascarilla ofrece una Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE, por sus siglas en inglés) superior al 99% contra microorganismos generados por el portador de la mascarilla, y cumple las normas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto al control de la exposición a la bacteria *M. Tuberculosis*. Se adapta a una amplia variedad de tamaños de cara, es resistente a los fluidos y apta para ambientes quirúrgicos.

**NOTA:** La Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) se ha comprobado de acuerdo con el método descrito en MILM36954C, ASTM F2101. La resistencia cumple la norma ASTM F1862, 160 mmHg.

#### Usos previstos

La mascarilla quirúrgica filtrante de partículas para uso médico Sperian ONE-Fit HC-NB295F Healthcare es una mascarilla desechable de clase N95 aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Laboral (NIOSH, por sus siglas en inglés) prevista para ser utilizada por personal de asistencia médica durante procedimientos médicos o quirúrgicos con el fin de proteger tanto al portador de la mascarilla como al paciente contra salpicaduras de sangre y de otros materiales potencialmente infecciosos y reducir la transferencia de microorganismos y otras partículas de transmisión aérea. Además, la mascarilla Sperian ONE-Fit cumple las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto al control de la exposición a la tuberculosis en instalaciones de atención médica y está diseñada para servir como mascarilla de aislamiento.

#### Cómo colocarse la mascarilla

Siga estas instrucciones siempre que vaya a utilizar mascarilla.



PASO 1

Hale los bordes superior e inferior de la mascarilla para abrirla por completo. Agarre la cinta para la cabeza a ambos lados del corte que se encuentra en la mitad de la cinta y hale para separarla en dos.



PASOS 2 y 3

Doble el alambre de la parte de la nariz de forma que se curve un poco para darle a la mascarilla la forma de una taza.



PASO 4

Coloque el borde inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y pase las cintas de sujeción por encima de la cabeza.



PASO 5

Coloque la cinta inferior alrededor del cuello. Coloque la cinta superior sobre la coronilla.



PASO 6

Para dar forma al área de la nariz, deslice las yemas de los dedos de ambas manos por la parte superior de la pieza para la nariz, a ambos lados de la nariz, presionando hacia adentro al mismo tiempo. Utilice siempre ambas manos.

*Antes de utilizar el respirador, realice una comprobación del ajuste.*

#### Instrucciones para comprobar el ajuste

- Coloque ambas manos sobre la mascarilla; tenga cuidado de **NO** mover de lugar la mascarilla.
- Exhale con fuerza (deberá sentir una presión positiva en el interior de la mascarilla).
- Si detecta fugas de aire, vuelva a ajustarse las cintas de sujeción de la mascarilla o la posición de la mascarilla.

**ADVERTENCIA:** Si no consigue que la máscara se ajuste a su rostro de forma satisfactoria, **NO** ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.

#### Instrucciones de uso

1. El incumplimiento de alguna de las instrucciones y restricciones relativas al uso de la mascarilla, o no utilizar la mascarilla durante todo el tiempo que dure la exposición a los contaminantes puede afectar drásticamente las características de la mascarilla y ocasionar enfermedades, lesiones o muerte.
2. Antes de utilizar la mascarilla, el empleador debe proporcionarle capacitación acerca del uso correcto de la mascarilla conforme a las normas de sanidad y seguridad pertinentes.
3. La normativa de la OSHA, incluyendo las normas 29CFR1910.134(e)(5) y (f), y la norma Z94.4-93 de la CSA, exigen que se realicen pruebas de ajuste a la persona que deba llevar la mascarilla.
4. Si siente dificultad para respirar o la mascarilla sufre algún daño, salga del área contaminada.
5. En las siguientes circunstancias, deseche la mascarilla y cámbiela por una nueva:
  - la mascarilla se obstruye excesivamente y siente dificultad para respirar.
  - la mascarilla sufre algún daño.
  - la mascarilla se contamina con sangre o fluidos corporales.
6. Cuando utilice la mascarilla en procedimientos quirúrgicos, deséchela después de cada uso.
7. **NO** utilice la mascarilla si tiene barba o vello facial que impida el contacto directo entre el rostro y el borde de la mascarilla, ni bajo ninguna otra circunstancia que pueda impedir la creación de un buen sello entre la mascarilla y el rostro.
8. Esta mascarilla **NO** debe utilizarse en niños.

#### Advertencia

Esta mascarilla ayuda a protegerse contra determinados agentes contaminantes. Sin embargo, es posible que no elimine el riesgo de contraer una enfermedad o infección. El uso incorrecto de una mascarilla puede causar enfermedades o la muerte.

Las cintas de sujeción de la mascarilla están hechas de caucho sin látex. Sin embargo, las personas que sean muy sensibles al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.

Para obtener más información o asistencia en relación con los productos Sperian de protección para la respiración, contacte a su distribuidor local de Sperian directamente a Sperian Respiratory Protection | [www.sperianprotection.com](http://www.sperianprotection.com)